

Indikacije

Proizvod je namenjen za subkutanu infuziju insulina iz insulinske pumpe.

Kontraindikacije

Infuzioni kompleti indikovani su samo za subkutanu primenu, a ne i za i.v. (intravensku) infuziju, ili infuziju krvi i krvnih proizvoda.

Upozorenje

Nepravilno injektovanje i održavanje mesta na kome je injektovani infuzioni komplet može dovesti do neodgovarajuće isporuke leka, infekcije i/ili nadražaja tog mesta.

Pre injektovanja izabrano mesto treba očistiti izopropil alkoholom.

Skinuti zaštitni poklopac sa uvodne igle pre injektovanja infuzionog seta.

Prvu primenu i postavljenje infuzionog seta obaviti u prisustvu lekara ili zdravstvenog radnika.

Paziti da u infuzionom kompletu ne ostane mehurića vazduha: proveriti rezervoar i u potpunosti prošpricati kateter.

Često proveravati da li je kanila potpuno priljubljena uz kožu, moguće je da je uvučena i ako nema bola.

Kanila mora biti potpuno injektovana, u suprotnom neće biti isporučena željena količina leka.

Ako dođe do upale mesta injektovanja infuzionog seta, treba uzeti drugi infuzioni set i injektovati ga na drugom mestu, sve dok se upala ne izleči. Zameniti infuzioni set ukoliko se samolepljiva traka olabavi ili ako se mekana kanila delimično ili potpuno izvuče.

Menjati infuzioni set svakih 48 do 72 sata, ili po savetu Vašeg lekara ili zdravstvenog radnika.

Uvodnu iglu ne vraćati ponovo u infuzioni set. Ponovo uvlačenje uvodne igle može dovesti do oštećenja mekane kanile i/ili nepredviđenog protoka leka.

Kada je infuzioni set injektovan ne sme se vršiti prošpricavanje ili produvavanje katetera, da ne bi došlo do unošenja prevelike količine leka.

Ne stavljati dezinfekciona sredstva, parfeme ili dezodoranse na infuzioni komplet, jer bi mogli uticati na svojstva kompleta.

Infuzioni komplet i iglu, nakon jednokratne upotrebe odložiti u odgovarajući spremnik. Ne čistiti, ne prati, ne resterilizovati ...

Ovaj uređaj je sterilan i apirogen, osim u slučaju da je ambalaža oštećena ili otvorena. Ne koristiti ga u slučaju da je ambalaža oštećena ili otvorena. (Za korisnike Paradigm insulinskih pumpi, ne koristiti infuzioni set u slučaju da je igla na spojnici katetera koja služi za povezivanje sa rezervoarom oštećena).

Infuzione komplete držati na hladnom i suvom mestu. Ne izlagati sunčevoj svetlosti i ne ostavljati ih u automobilu.


Kod privremenog odlaganja kompleta koristiti tehnike asepe i posavetovati se sa lekarom o načinu nadoknade leka. Kod infuzije insulina pažljivo pratiti nivo glukoze u krvi dok je infuzioni komplet odvojen i nakon ponovnog spajanja.

Ako u toku infuzije insulina nivo glukoze u krvi postane neobjašnjivo visok, ili alarm javi da je zaustavljena isporuka insulina, proveriti infuzioni komplet, da li negde curi ili postoji začepljenje. Ako se ne može ustanoviti, promeniti infuzioni komplet, jer je moguće da se mekana kanila savila, nabrala ili delimično zapušila. Posavetovati se sa lekarom o planu za brzu nadoknadu insulina.

Proveriti nivo glukoze u krvi da bi se utvrdilo da li je problem rešen.

Ne menjati infuzioni komplet pre odlaska na spavanje, osim ako postoji mogućnost provere nivoa glukoze u krvi 1 do 3 sata nakon promene infuzionog kompleta. Ponovna upotreba istog infuzionog kompleta može izazvati oštećenje kanile/uvodne igle i dovesti do infekcije ili nadražaja mesta injektovanja, kao i neodgovarajuće isporuke leka.

Ako insulin ili bilo koja druga tečnost dođe na spojnicu infuzionog kompleta koja služi za spajanje sa rezervoarom, može doći do privremenog zapušanja ventila, koji omogućava ispravno prošpricavanje katetera. Ovo može izazvati isporuku premalo ili previše insulina, što može izazvati hiperglikemiju ili hipoglikemiju. Ako se ovo dogodi početi iznova sa novim infuzionim kompletom i rezervoarom.

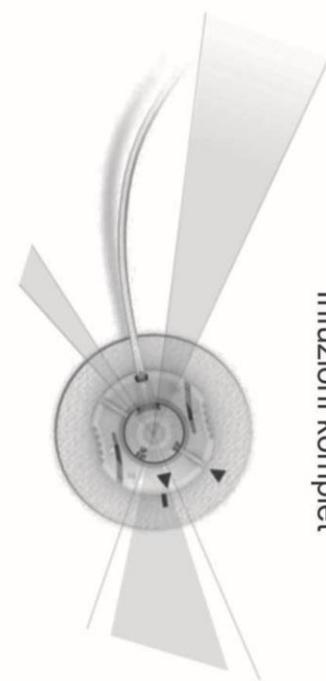

Infuzioni komplet

MiniMed™ Quick-set™

Garancija

Javiti se lokalnom predstavniku, zvati tehničku podršku ili posetiti <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>

Odgovarajuća sprava za injektovanje ovih infuzionih setova je Quick-serter.

Značenje oznaka na pakovanju.

Oznaka	Značenje
	Upotrebljivo do
	Za jednokratnu upotrebu.
	Pažljivo pročitati uputstvo za upotrebu
REF	Referentni/kataloški broj: broj modela.
	Ovde otvoriti
LOT	Broj serije
STERILE/EO	Sterilisano plinom etilenoksidom.
	Apirogeno
	Bez lateksa
1 2 3	Zameniti svaka 3 dana
	Proizvođač

Napomena: Quick-Set grupa infuzionih kompleta je SERTABLE™ i kompatibilna je sa QUICK-SERTER™ uređajem za injektovanje



Medtronic
MINIMED

Distributer:

Medtronic MiniMed
18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325, USA
800 646 4633, 818 576 5555

EU predstavništvo

Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands

Proizvođač:

Unomedical A/S
Aaholmvej 1-3, Osted
4320 Lejre
Denmark

Nosilac upisa u Registar:

Epsilon Research International doo
Bulevar Mihajla Pupina 10E 413
11070 Beograd, Srbija
Telefon: 011 311 5554

Broj upisa u Registar:

515-02-01836-14-001 od 5.11.2014.

Važi do: 11.11.2017.


Uvoznik:

Epsilon Research International doo
Bulevar Mihajla Pupina 10E 413
11070 Beograd

Izdaje se samo na lekarski recept i prema preporuci lekara.

Način primene infuzionog seta

Pogledati uputstvo za upotrebu insulinske pumpe i rezervoara radi postavljanja rezervoara u pumpu i prošpricavanje katetera.

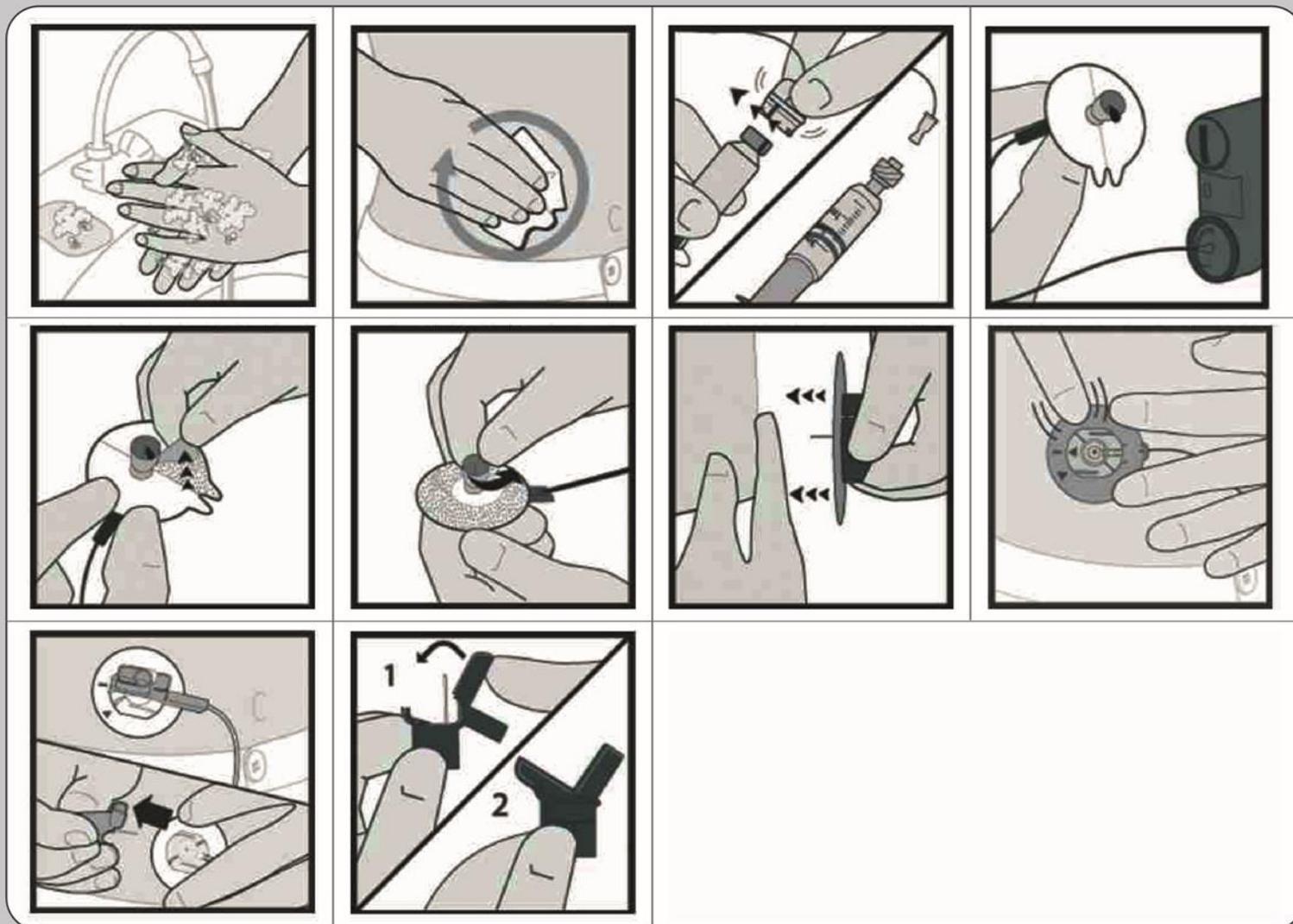

Ispuniti praznu kanilu dodavanjem U - 100 insulina


6mm

0.3u
0,3u
0,3e
0.003ml
0,003ml

9mm

0.5u
0,5u
0,5e
0.005ml
0,005ml

Odvajanje katetera od kanile

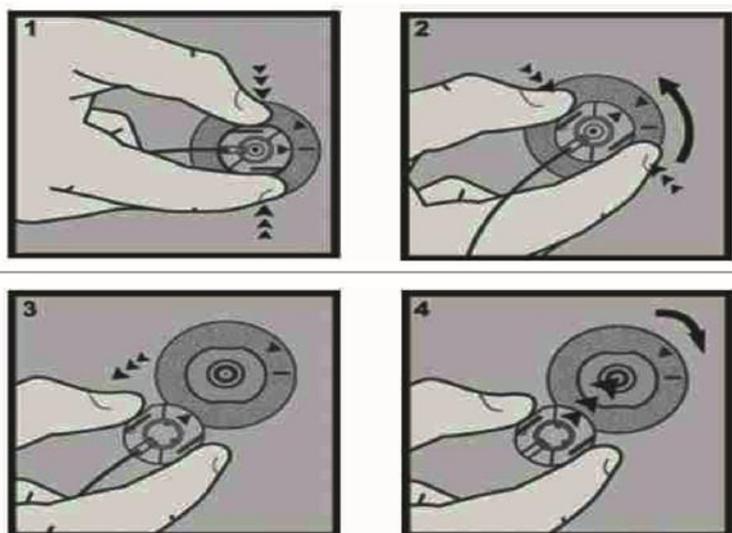

Ponovno spajanje katetera sa kanilom

